



# Test delle Allergie per Cani


## Istruzioni per Raccogliere il Campione

Rimuovere il dispositivo di raccolta e il piccolo tubo dalla confezione e segui i sei passi seguenti:


- 1 Riponi il piccolo tubo con il liquido (c) fuori dalla confezione e tienilo a portata di mano.



- 2 Rimuovi il manico blu (a) dal tubo di plastica (b) e tienilo (b) a portata di mano.

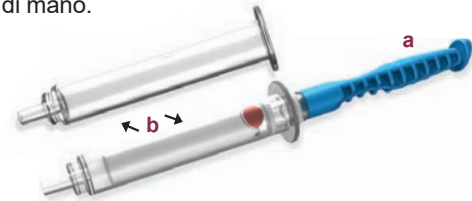

- 3 Mantieni il manico blu del dispositivo (a). Dovrebbe esserci il tubo (b) rimosso ed avere il dispositivo di cotone per la raccolta esposto.

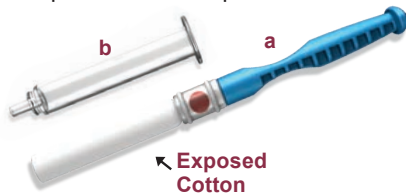

- 4 Mantieni il manico blu, posiziona il dispositivo nella bocca del tuo animale per impregnarlo di liquido. Al di sotto della lingua, lateralmente alla bocca o all'interno delle guance puoi raccogliere il liquido.




- 5 Lascia che il dispositivo assorba il liquido dalla bocca del tuo cane fino a che il punto indicatore non diventi rosso. Può richiedere dai 15 secondi ad un paio di minuti, dipende dalla quantità di liquido assorbito.



### PASSO FINALE: Ce l'hai fatta!

Una volta fatto, puoi gettare (a) e (b). Assicurati che il tubo (c) che contiene il campione del tuo cane sia chiuso fermamente e inseriscilo all'interno della piccola busta e rinviacelo per l'analisi.

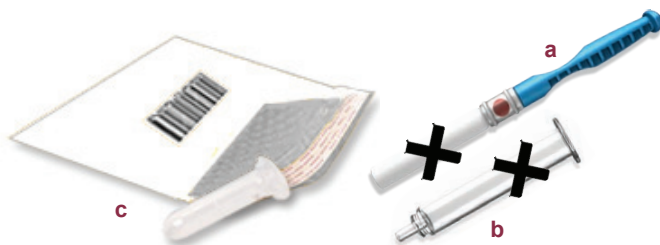

- 6 Posiziona il tubo plastico (b) al di sopra del dispositivo di cotone. Posiziona la parte bassa del tubo (b) nel tubo con il liquido (c), dovrebbe fare click una volta posizionato. Una volta fatto ciò premere in modo deciso il manico blu e permettere così il liquido di penetrare (c). Se il liquido si è asciugato aggiungere un poco d'acqua. Questo avviene solamente se si è tenuto il kit per qualche settimana prima di utilizzarlo.



### ALCUNE NOTE AGGIUNTIVE:

- Puoi provare più volte a prendere il liquido, non deve necessariamente avvenire in un solo momento.
- Puoi mantenere uno snack davanti al tuo cane mentre raccogli il liquido per stimolarlo e ottenere più liquido.

### ULTERIORI SUGGERIMENTI:

Ti preghiamo di inviarcì il tuo campione entro 24 ore dalla raccolta. Viene raccomandato di raccogliere i campioni ad inizio settimana così non rimarranno in giacenza nel sistema postale per il weekend. Il campione ha una durata di approssimativamente 10 giorni una volta raccolto.

